

**FILE INFORMATION**

Description: SKYN AQUAFEEL BeNeLux
multipage label

Dieline: custom

Market: EMEA

Size: open 173mmx57mm
closed 45x57mm

PK: EPKK00168

Date Work Performed: 15-06-22

Colors Used:



**GLUED
(back of label)**

173mm

FRONT/FIRST PAGE

DE AQUAFEEL™ GLEITGEL

- Auf Wasserbasis/nicht fettig • Aloe Vera (pH-Einsteller) + Vitamin E (pH Puffer) • Frei von Farbstoffen • Frei von Duftstoffen.

Bestimmt zur Linderung der vaginalen Trockenheit beim Geschlechtsverkehr. Dieses Gleitmittel hat keine empfängnisverhütende Wirkung und enthält kein Spermizid. Erfüllt die Anforderungen an die Kondomkompatibilität gemäß der Norm ISO 19671.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Tragen Sie bis zu 10 Pumpen Gleitmittel aus dem Spender auf den Genitalbereich auf. Kann vor oder während des Geschlechtsverkehrs angewendet werden. Je nach Bedarf erneut auftragen, jedoch nicht mehr als 25 Pumpen aus dem Spender. Nicht die gesamte Menge der Flasche auftragen. Wenn Unbehagen oder Reizungen auftreten, die Anwendung abbrechen. Wenn die Reizung anhält, suchen Sie einen Arzt auf. Nicht auf beschädigter oder verletzter Haut oder Schleimhaut anwenden. Gut verschließen, um Austrocknen zu verhindern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht schützen. Innerhalb von 6 Monaten nachdem Öffnen verwenden. Nicht verwenden, wenn die perforierte Versiegelung offen oder beschädigt ist. Etikett nicht vollständig entfernen. Verantwortungsbewusst entsorgen.

MD Medizinisches Gerät: Alle schweren Vorfälle in Bezug zu diesem Medizinprodukt können dem Hersteller und der in Ihrem Wohnsitzland zuständigen Behörde gemeldet werden.

EN AQUAFEEL™ LUBRICANT

- Water-based / non greasy • Aloe Vera (*pH adjuster) + Vitamine E (**pH buffer) • Transparent • Fragrance-free.

® and ™ are trademarks owned by LifeStyles Healthcare Pte Ltd in various jurisdictions. © 2022 LifeStyles Healthcare Pte Ltd

Patents : www.lifestyles.com/our-patents

Suretex Ltd, 31/1 Moo 4, Suratthani- Thakuapha Road, Tambon Khao Hua kwai, Amphur Phunphin, Suratthani 84130 THAILAND

EC REP SXWell Belgium, Riverside Business Park, Block I

Internationalelaan 55, 1070 Brussels, BELGIUM

UK RP: SXWell UK, 6th Floor,
60 Gracechurch Street, London,
United Kingdom, EC3V 0HR

Lifestyles Europe SAS,
4-6 Rue des Chauffours, CS 70006
95095 Cergy, France
EPKK00168 - 06/22

FR Voir à l'intérieur
EN See inside
NL Zie binnenkant
DE Siehe Innenseite

5 011831 090530
CNK 3782-398



CNK 3782-398



i

5 011831 090530
CNK 3782-398

CNK 3782-398



i

5 011831 090530
CNK 3782-398

CNK 3782-398



i

5 011831 090530
CNK 3782-398

CNK 3782-398

i

5 011831 090530
CNK 3782-398

CNK 3782-398

i

