



INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN

—
para preservativos SKYN

PASO 1 Imprima esta página.

Para asegurarse de que obtiene la medida correcta, coloque una tarjeta de débito o crédito en el espacio que aparece a continuación. Si encaja, tiene la escala correcta. Si no es así, asegúrese de que la opción "escala de la impresora" está desactivada y compruebe que el documento se imprime a tamaño 100%.

PASO 2 Recorte el *Instrumento de Medición de la Circunferencia*.

PASO 3 Mida su circunferencia.

Coloque la parte cuadrada del instrumento de medición en la parte más ancha de su erección, según la imagen de la derecha. Enrolle este medidor como un cinturón hasta que las dos flechas se alineen con una banda sombreada. Esta banda le da su GROSOR.

PASO 4 Seleccione el preservativo SKYN

que corresponda a su circunferencia.

¿Cómo debe ajustarse un preservativo?

Un ajuste adecuado es cómodo y se mantiene en su posición. SKYN recomienda un preservativo ligeramente más ajustado que el contorno del pene, para que el preservativo se mantenga en su posición.

**COLOQUE SU
TARJETA DE DÉBITO
O CRÉDITO AQUÍ**

