



## INDICATIONS DE MESURE

—  
pour les préservatifs SKYN

### ÉTAPE 1 Imprimez cette page.

Pour vous assurer que vous obtenez la bonne mesure, placez une carte de débit ou de crédit dans l'espace prévu ci-dessous. Si la carte s'insère dans l'espace, vous avez la bonne échelle. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que l'option "mise à l'échelle de l'imprimante" a été désactivée et vérifiez que le document s'imprime à 100 %.

### ÉTAPE 2 Découpez l'outil de mesure de la circonférence.

### ÉTAPE 3 Mesurez votre circonférence.

Placez la partie carrée de l'outil de mesure sur la partie la plus large de votre érection, comme sur l'image de droite. Enroulez cet outil de mesure comme une ceinture jusqu'à ce que les deux flèches s'alignent sur une bande ombrée. Cette bande vous donne VOTRE CIRCONFÉRENCE.

### ÉTAPE 4 Sélectionnez le préservatif SKYN

qui correspond à votre circonférence.

### Comment un préservatif doit-il s'ajuster ?

Un préservatif bien ajusté est à la fois confortable et bien maintenu en position. SKYN recommande un préservatif légèrement plus serré que la circonférence du pénis, afin que le préservatif reste en place.

**PLACEZ VOTRE  
CARTE DE DÉBIT  
OU DE CRÉDIT ICI**

