



ISTRUZIONI PER LA MISURAZIONE

per i preservativi SKYN

FASE 1 Stampare questa pagina.

Per assicurarsi di ottenere la misura giusta, inserire una carta di credito o di debito nello spazio sottostante. Se la carta corrisponde, la scala di misurazione è corretta. In caso contrario, assicurarsi che la funzione "Ridimensionamento" della stampante sia disattivata e verificare che il documento venga stampato al 100%.

FASE 2 Ritagliare lo strumento di misurazione della circonferenza.

FASE 3 Misurare la circonferenza.

Posizionare la parte quadrata dello strumento di misurazione sulla parte più larga dell'erezione, come nell'immagine a destra. Avvolgere lo strumento di misurazione come una cintura finché le due frecce non si allineano con una delle fasce ombreggiate. Questa fascia indica la vostra CIRCONFERENZA.

FASE 4 Scegliere il preservativo SKYN

che corrisponde alla vostra circonferenza.

Come deve calzare un preservativo?

Un profilattico che calza bene è comodo e mantiene la posizione in modo aderente. SKYN consiglia un preservativo leggermente più stretto della circonferenza del pene, in modo che il preservativo rimanga in posizione.

**INSERISCI QUI LA
CARTA DI CREDITO
O DI DEBITO**

