



## INSTRUÇÕES DE MEDIÇÃO

—  
para os Preservativos SKYN

### PASSO 1 Imprima esta página.

Para garantir que obtém a medida correcta, coloque um cartão de débito ou de crédito no espaço fornecido em baixo. Se couber, é porque a escala está correcta. Caso contrário, certifique-se de que a opção "escala da impressora" foi desativada e verifique se o documento está a ser impresso com um tamanho de 100%.

### PASSO 2 Recorte o instrumento de medição da grossura.

### PASSO 3 Meça a sua grossura.

Coloque a parte quadrada do instrumento de medição na parte mais larga da sua ereção, como na imagem à direita. Enrole este instrumento de medição como um cinto até que as duas setas se alinhem com uma faixa sombreada. Esta faixa dá-lhe a sua GROSSURA.

### PASSO 4 Seleccione o preservativo SKYN

que corresponde à sua grossura.

### Como é que um preservativo se deve ajustar?

Um preservativo bem ajustado é confortável e mantém-se na posição correcta. SKYN recomenda um preservativo ligeiramente mais apertado que a grossura do pénis, para que o preservativo se mantenha na posição correcta.

**COLOCAR CARTÃO  
DE DÉBITO OU  
CRÉDITO AQUI**

